

Výrobky MOBIDERM® pro intenzivní fázi léčby lymfedému

- Bandáž a podložka MOBIDERM® jsou vyráběny jako „polotovary“, je možné je snadno stříhat běžnými nůžkami a tím zkracovat, resp. vytvořit před přiložením na tělo vhodný tvar.
- V oblasti aplikace mohou vzniknout místa se zvýšeným třením. V případě podráždění či precitlivělosti stačí vložit mezi pokožku a MOBIDERM® ochrannou vrstvu obvazu.
- Je doporučeno užívat výrobky MOBIDERM individuálně, tj. pouze jedním pacientem.
- Nepřikládejte MOBIDERM® na otevřené rány, ani na plochu kůže se známkami infekce.
- Údržba výrobků MOBIDERM® je velmi jednoduchá: krátce ručně přeperte ve vlažné mýdlové vodě, propláchněte od zbytků mýdla, lehce vytlačte přebytečnou vodu a zvolna usušte bez použití sálavého tepla.

V lymfologii umožňuje MOBIDERM®:

- Rychle obnovit mobilitu podkožních tkání.
- Zlepšit pružnost zatvrdlých ploch pokožky.
- Připravit tyto tkáně k dosažení lepší účinnosti lymfatické drenáže.
- Obnovit fyziologické podmínky pro výměnu na úrovni mikrooběhu.
- Uspořit čas při intenzivní fázi léčby.

V dermatologii umožňuje MOBIDERM®:

- Účinně ošetřit a změkčit hypertrofické jizvy a ztvrdlé tkáně (hyperkeratóza...).

V traumatologii, ortopedii a estetické chirurgii umožňuje MOBIDERM®:

- Drénovat otoky (často bolestivé).
- Zlepšit hojení tkání.



BANDÁŽ MOBIDERM®



PODLOŽKA MOBIDERM®

BANDÁŽ MOBIDERM 10 cm × 3 m
S KOSTIČKAMI 15 × 15 mm
kód VZP 0082006 kód SUKL 5006138

PODLOŽKA MOBIDERM® 30 cm × 1 m
S KOSTIČKAMI 15 × 15 mm
kód VZP 0082007 kód SUKL 5006141

PODLOŽKA MOBIDERM® 30 cm × 1 m
S KOSTIČKAMI 5 × 5 mm
kód VZP 0082008 kód SUKL 5006142

THUASNE – dlouhodobá tradice v oblasti vývoje a výroby zdravotnických pomůcek

- Více než 160 let zkušeností
- Vysoce kvalitní produkty
- Jedinečnost výrobních technologií
- Vlastní výzkum a vývoj
- Široké spektrum výrobků



Thuasne CR s. r. o.
Naskové 3, 150 00 Praha 5

Info linka:
602 189 582, 606 189 582

Objednávky
sklad@thuasne.cz
objednavky@thuasne.cz
www.thuasne.cz

Photo Thuasne © Studio Caterin



MOBIDERM® INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K LÉČBĚ LYMFEDÉMU



Wings for your health

Výrobky MOBIDERM® pro udržovací fázi léčby lymfedému

Kompresivní návleky MOBIDERM® slouží především pro stabilizaci redukce objemu lymfedému v období udržovací fáze léčby.



od 1. 10. 2019
plná úhrada
pojišťovnou

Autofit 3733 KOMPRESIVNÍ PAŽNÍ NÁVLEK NA SUCHÝ ZIP

- Velké kostičky 15 × 15 mm na paži
- Malé kostičky 5 × 5 mm na ruce
- 6 velikostí, 2 délky
- 2 provedení: zvlášť pro pravou a zvlášť pro levou ruku

kód SUKL 5006147



od 1. 10. 2019
částečná úhrada
pojišťovnou

Autofit 3734 KOMPRESIVNÍ NÁVLEK NA LÝTKO NA SUCHÝ ZIP

- Velké kostičky 15 x 15 mm na lýtku
- Malé kostičky 5 x 5 mm na nártu
- 4 velikosti, 4 délky
- Oboustranné použití (pro pravou i levou nohu)

kód SUKL 5006148



od 1. 10. 2019
plná úhrada
pojišťovnou

Autofit 3735 KOMPRESIVNÍ NÁVLEK NA NOHU NA SUCHÝ ZIP

- Velké kostičky 15 × 15 mm na noze
- Malé kostičky 5 × 5 mm na nártu
- 4 velikosti, 4 délky
- Oboustranné použití (pro pravou i levou nohu)

kód SUKL 5006150



MOBIDERM® 3730 KOMPRESIVNÍ PAŽNÍ NÁVLEK STANDARD

- Velké kostičky 15 × 15 mm
- 10 velikostí, 2 délky
- Oboustranné použití (pro pravou i levou ruku)

kód VZP 0171710
kód SUKL 5006146



MOBIDERM® 3731 KOMPRESIVNÍ RUKAVIČKA BEZ PRSTŮ

- Malé kostičky 5 × 5 mm
- 6 velikostí
- Oboustranné použití (pro pravou i levou ruku)

kód VZP 0171711
kód SUKL 5006145



MOBIDERM® 3732 KOMPRESIVNÍ RUKAVIČKA S PRSTY

- Malé kostičky 5 × 5 mm
- 6 velikostí
- 2 provedení: zvlášť pro pravou a zvlášť pro levou ruku

kód VZP 0171712
kód SUKL 5006143

Měření velikostí (cm)

| | E | D | C | B |
|---|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 25-32 | 22-28 | 15-19 | 17-21 |
| 2 | 29-36 | 24-30 | 16-20 | 17-21 |
| 3 | 33-40 | 26-32 | 17-21 | 18-22 |
| 4 | 37-44 | 28-34 | 17-21 | 18-22 |
| 5 | 41-48 | 30-36 | 18-22 | 19-23 |
| 6 | 45-52 | 31-37 | 19-23 | 20-24 |

Normal L = 40-45 Long L = 45-50

Měření velikostí (cm)

| | B | C | D |
|---|-------|-------|-------|
| 1 | 16-24 | 24-35 | 25-36 |
| 2 | 20-28 | 32-43 | 32-43 |
| 3 | 24-32 | 40-51 | 39-50 |
| 4 | 28-36 | 48-59 | 46-57 |

Short L = 38-40 Long L = 42-44
Normal L = 40-42 Xtra Long L = 44-46

Měření velikostí (cm)

| | B | C | G |
|---|-------|-------|-------|
| 1 | 16-24 | 24-35 | 46-57 |
| 2 | 20-28 | 32-43 | 53-65 |
| 3 | 24-32 | 40-51 | 61-72 |
| 4 | 28-36 | 48-59 | 68-80 |

Short L = 67-72 Long L = 77-82
Normal L = 72-77 Xtra Long L = 82-87

Měření velikostí (cm)

| | C | D | E |
|----|-------|-------|-------|
| 1 | 14-16 | 22-25 | 25-29 |
| 1+ | | 24-27 | 28-32 |
| 2 | 16-18 | 25-28 | 29-33 |
| 2+ | | 27-30 | 31-35 |
| 3 | 18-20 | 28-31 | 32-36 |
| 3+ | | 30-33 | 35-39 |
| 4 | 20-22 | 31-34 | 35-39 |
| 4+ | | 33-36 | 38-42 |
| 5 | 22-24 | 34-37 | 38-42 |
| 5+ | | 36-39 | 41-45 |

Long >165 cm
Normal <165 cm

Měření velikostí (cm)

| | C | B |
|---|-------|-------|
| 1 | 14-16 | 15-17 |
| 2 | 16-18 | 17-19 |
| 3 | 17-19 | 19-21 |
| 4 | 19-21 | 21-23 |
| 5 | 20-22 | 23-25 |
| 6 | 21-23 | 25-27 |

Měření velikostí (cm)

| | C | B |
|---|-------|-------|
| 1 | 14-16 | 15-17 |
| 2 | 16-18 | 17-19 |
| 3 | 17-19 | 19-21 |
| 4 | 19-21 | 21-23 |
| 5 | 20-22 | 23-25 |
| 6 | 21-23 | 25-27 |