

Mechanismus účinku výrobků MOBIDERM®

Po aplikaci bandáže či obléknutí návleku MOBIDERM® dochází při pohybu pacienta v důsledku změny objemu a tvaru patřičných svalových skupin k neustálému střídání velikosti tlaku na edematózní tkáň – tím probíhá neustálá lokální drenáž.

Efekt použití výrobků MOBIDERM®

- Redukce objemu edému v podkožní tkáni.
- Zlepšení účinnosti drenáže žilně-lymfatické.
- Podpora lokální mikrocirkulace.
- Urychlení ústupu edému.



THUASNE – dlouhodobá tradice v oblasti vývoje a výroby zdravotnických pomůcek

- Více než 160 let zkušeností
- Vysoce kvalitní produkty
- Jedinečnost výrobních technologií
- Vlastní výzkum a vývoj
- Široké spektrum výrobků



Thuasne CR s. r. o.
Naskové 3, 150 00 Praha 5
Objednávky:
602 189 582, 606 189 582
E-mail: sklad@thuasne.cz
objednavky@thuasne.cz
www.thuasne.cz



MOBIDERM® INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K LÉČBĚ LYMFEDÉMU



NOVĚ: ÚHRADA VZP

Wings for your health

- Primární lymfedém se vyskytuje u 1 z 10 000 obyvatel ve věku pod 20 let, ženy jsou postiženy častěji než muži
- 10 až 35% žen, které podstoupily operaci prsu pro karcinom s odstraněním lymfatických uzlin nebo po radioterapii, trpí sekundárním lymfedémem horního ramene⁽¹⁾
- 7 až 46% případů léčby melanomu nebo jiného nádoru v oblasti pánve spolu se zákrokem v oblasti třísel končí sekundárním lymfedémem⁽²⁾



Psychologické a sociální dopady

- Únava
- Problémy se spánkem⁽³⁾
- Nesouměrné tělesné proporce spojené se společenskou izolací⁽⁴⁾
- Úzkost a deprese⁽⁵⁾

Komplikace s infekcí jsou někdy vážné, ale vždy znepokojující

- Erysipela
- Celulitida
- Lymfangitida
- Nekrotická fascitida

Riziko maligního zvrhnutí

- Lymfangiosarkom
- Kaposiho sarkom
- Epidermoidní karcinom

(1) Golshan. J support oncol 2006
(2) Hinrichs. J sur oncol 2004
(3) Armer et al. lymphology 2002

(4) Tobin et al. cancer 1993
(5) McWayne. cancer 2005

Výrobky MOBIDERM® pro intenzivní fázi léčby lymfedému

- Bandáž a podložka MOBIDERM® jsou vyráběny jako „polotovary“, je možné je snadno stříhat běžnými nůžkami a tím zkracovat, resp. vytvořit před přiložením na tělo vhodný tvar.
- V oblasti aplikace mohou vzniknout místa se zvýšeným třením. V případě podráždění či přecitlivělosti stačí vložit mezi pokožku a MOBIDERM® ochrannou vrstvu obvazu.
- Je doporučeno užívat výrobky MOBIDERM individuálně, tj. pouze jedním pacientem.
- Nepřikládejte MOBIDERM® na otevřené rány, ani na plochu kůže se známkami infekce.
- Údržba výrobků MOBIDERM® je velmi jednoduchá: krátce ručně přeperte ve vlažné mýdlové vodě, propláchněte od zbytků mýdla, lehce vytlačte přebytečnou vodu a zvolna usušte bez použití sálavého tepla.

V lymfologii umožňuje MOBIDERM®:

- Rychle obnovit mobilitu podkožních tkání.
- Zlepšit pružnost zatvrdlých ploch pokožky.
- Připravit tyto tkáně k dosažení lepší účinnosti lymfatické drenáže.
- Obnovit fyziologické podmínky pro výměnu na úrovni mikrooběhu.
- Uspořit čas při intenzivní fázi léčby.

V dermatologii umožňuje MOBIDERM®:


- Účinně ošetřit a změkčit hypertrofické jizvy a ztvrdlé tkáně (hyperkeratóza...).

V traumatologii, ortopedii a estetické chirurgii umožňuje MOBIDERM®:

- Drénovat otoky (často bolestivé).
- Zlepšit hojení tkání.



BANDÁŽ MOBIDERM®

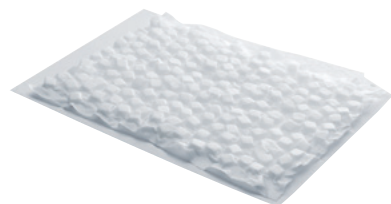

PODLOŽKA MOBIDERM®

UPOZORNĚNÍ!

Tyto výrobky jsou zařazeny do kapitoly 01 Číselníku VZP a mohou být předepsány pouze specialistou „J16“ (odborná pracoviště s činností angiologickou a lymfologickou); poukaz musí být potvrzen revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny:

BANDÁŽ MOBIDERM® 10 cm x 3 m
kód VZP 0082006

PODLOŽKA MOBIDERM® 25 cm x 1 m S KOSTIČKAMI 15 x 15 mm
kód VZP 0082007

PODLOŽKA MOBIDERM® 25 cm x 1 m S KOSTIČKAMI 5 x 5 mm
kód VZP 0082008

Výrobky MOBIDERM® pro udržovací fázi léčby lymfedému

Kompresivní návleky MOBIDERM® slouží především pro stabilizaci redukce objemu lymfedému v období udržovací fáze léčby. Zdravotní pojišťovnou jsou hrazeny částečně.



MOBIDERM® 3730
KOMPRESIVNÍ
PAŇNÍ NÁVLEK

- Velké kostičky 15 x 15 mm
- 10 velikostí, 2 délky
- Oboustranné použití (pro pravou i levou ruku)

Kód VZP 0171710



MOBIDERM® 3731
KOMPRESIVNÍ
RUKAVIČKA BEZ PRSTŮ

- Malé kostičky 5 x 5 mm
- 6 velikostí
- Oboustranné použití (pro pravou i levou ruku)

Kód VZP 0171711



MOBIDERM® 3732
KOMPRESIVNÍ
RUKAVIČKA S PRSTY

- Malé kostičky 5 x 5 mm
- 6 velikostí
- 2 provedení: zvlášť pro pravou a zvlášť pro levou ruku

Kód VZP 0171712

Měření velikostí

	C	D	E	
1	14-16	22-25	25-29	
1+		24-27	28-32	
2	16-18	25-28	29-33	
2+		27-30	31-35	
3	18-20	28-31	32-36	
3+		30-33	35-39	
4	20-22	31-34	35-39	Long
4+		33-36	38-42	> 165cm
5	22-24	34-37	38-42	Normal
5+		36-39	41-45	< 165cm

Měření velikostí

	Obvod zápěstí C (cm)	Obvod dlaně B (cm)
Velikost 1	14-16	15-17
Velikost 2	16-18	17-19
Velikost 3	17-19	19-21
Velikost 4	19-21	21-23
Velikost 5	20-22	23-25
Velikost 6	21-23	25-27

Měření velikostí

	Obvod zápěstí C (cm)	Obvod dlaně B (cm)
Velikost 1	14-16	15-17
Velikost 2	16-18	17-19
Velikost 3	17-19	19-21
Velikost 4	19-21	21-23
Velikost 5	20-22	23-25
Velikost 6	21-23	25-27